


ETAPE 1

Insérer l'extrémité évasée de l'endoprothèse dans le panier introducteur d'endoprothèse jusqu'à la marque.

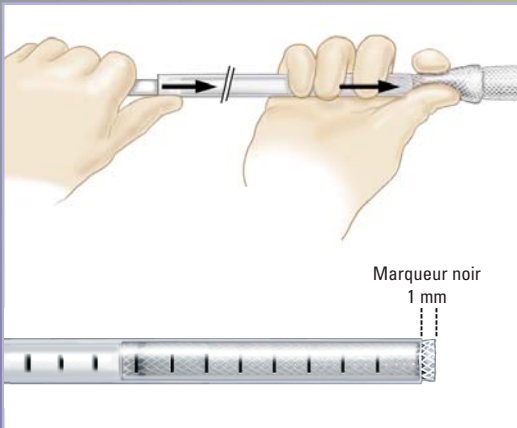


ETAPE 2

Tenir l'introducteur de l'endoprothèse d'une main et de l'autre main saisir le treillis et l'étirer sur l'endoprothèse. Etirer le treillis et l'endoprothèse simultanément afin d'obtenir un rétrécissement ou un effet entonnoir. Maintenir le mouvement d'étirement.


Faire glisser le tube d'insertion sur le treillis tout en maintenant l'endoprothèse jusqu'à ce qu'environ 1 mm (marqueur noir) de l'endoprothèse dépasse du tube d'insertion transparent.

- NOTA:**
- Si l'endoprothèse se replie ou s'affaisse, libérer l'endoprothèse et la réinsérer.
 - Si l'invagination de l'endoprothèse ne peut être corrigée, utiliser une autre endoprothèse.
 - Si l'endoprothèse est enfoncée trop loin dans le tube d'insertion, retirer l'endoprothèse et recommencer le processus d'insertion.

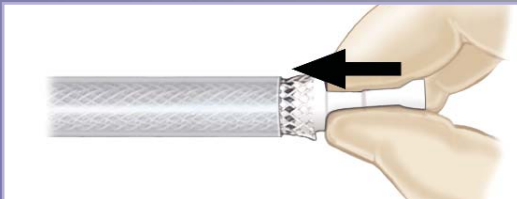

ETAPE 3

Insérer le bouchon et l'enfoncer fermement dans l'extrémité de l'endoprothèse afin de la maintenir en place.

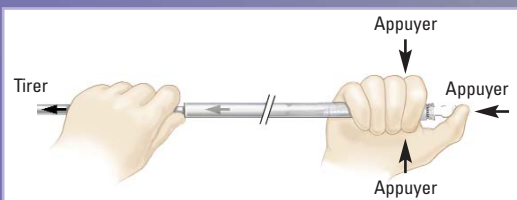

ETAPE 4

Retirer l'introducteur de l'endoprothèse en le tirant vers l'arrière tout en appuyant sur le bouchon avec le pouce.



ETAPE 5

Retirer le bouchon et **pousser l'endoprothèse à fond dans le tube d'insertion** jusqu'au marqueur à l'aide du pousse-endoprothèse flexible gradué.



ETAPE 6

- Insérer l'extrémité du **fil-guide** dans le tube d'insertion et de l'endoprothèse jusqu'à ce que le **dilatateur** ferme l'extrémité du tube.
- Enfiler l'extrémité libre du fil-guide dans le pousse-endoprothèse **flexible gradué** flèche vers l'avant, jusqu'à ce qu'il touche l'endoprothèse.
- Enfiler le **clamp** (par l'extrémité orange) sur l'extrémité libre du fil-guide jusqu'au pousse-endoprothèse flexible gradué. Serrer le système (extrémité bleue) jusqu'à ce qu'il ne bouge plus.

Polyflex Stent™ Endoprothèse oesophagienne en silicone auto-expansible

Etapes de montage du dispositif

Contenu du kit	
Polyflex Stent™	
Tube d'insertion	
Panier introducteur de l'endoprothèse	
Fil-guide avec dilateur et clamp de l'endoprothèse	
Pousse-endoprothèse flexible gradué	
Bouchon	

Polyflex Stent™ Endoprothèse oesophagienne en silicone auto-expansible

Références	Ø int. corps de l'endoprothèse (mm)	Ø int. évasement de l'endoprothèse (mm)	Longueur de l'endoprothèse (mm)	Ø ext. tube d'insertion (mm)
M00514270	16	20	90	12
M00514280	16	20	120	12
M00514290	16	20	150	12
M00514300	18	23	90	13
M00514310	18	23	120	13
M00514320	18	23	150	13
M00514330	21	25	90	14
M00514340	21	25	120	14
M00514350	21	25	150	14

Direction Européenne – Paris
T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

Afrique du Sud
T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

Allemagne (Appel gratuit)
T: 0800 072 3303 F: 0800 072 3319

Argentine
T: +54 11 4896 8556 F: +54 11 4896 8550

Australie / Nouvelle Zélande
T: +61 2 8336 5555 F: +61 2 9316 5528

Autriche
T: +43 1 726 30 05 1022 F: +43 1 726 30 05 1030

Balkans
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836

Belgique (Appel gratuit)
T: 080094 494 F: 080093 343

Bésil
T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

Bulgarie
T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09

Canada
T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

Chili
T: +562 445 4904 F: +562 445 4915

Chine – Beijing
T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566

Chine – Guangzhou
T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789

Chine – Shanghai
T: +86 21 6391 5600 F: +86 21 6391 5100

Colombie
T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761

Corée
T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

Danemark (Appel gratuit)
T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

Espagne
T: +34 901 11 12 15 F: +34 93 405 9045

Finlande (Appel gratuit)
T: 09 622 42 85 F: 09 622 42 86

France
T: +33 1 39 30 49 30 F: +33 1 39 30 49 31

Grande Bretagne & Irlande
T: +44 1727 866633 F: +44 1727 830371

Grèce
T: 0030 210 95 37 890 F: 0030 210 95 79 836

Hong Kong
T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276

Hongrie
T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

Inde – Bangalore
T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106

Inde – Chennai
T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

Inde – Delhi
T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024

Inde – Mumbai
T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783

Italie
T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

Les Pays-Bas
T: +31 43 356 8260 F: +31 43 356 8265

Malaisie
T: +60 3 7957 4266 F: +60 3 7957 4866

Mexique
T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

Moyen-Orient / Golfe Persique / Afrique du Nord
T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

Norvège (Appel gratuit)
T: 800 104 04 F: 800 101 90

Philippines
T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047

Pologne
T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410

Portugal
T: +351 1 381 25 40 F: +351 1 381 28 29

Republique Tchèque
T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334

Singapour
T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

Suède (Appel gratuit)
T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35

Suisse (Appel gratuit)
T: 0800 826 786 F: 0800 826 787

Taiwan
T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

Thaïlande
T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818

Turquie – Ankara
T: +90 312 447 98 50 F: +90 312 447 98 54

Turquie – Istanbul
T: +90 212 327 78 00 F: +90 212 327 74 27

Uruguay
T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

Venezuela
T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328

Toutes les marques déposées mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. AVERTISSEMENT : Conformément à la législation, ce dispositif ne peut être vendu que sous prescription médicale. Les indications, contre-indications, mises en garde et mode d'emploi figurent sur la notice livrée avec chaque dispositif. Informations à n'utiliser que dans les pays avec enregistrements produits des autorités sanitaires applicables. PSST IC 1921C Imprimé au Gosling par UK. **L'avenir dès maintenant.

Boston Scientific

*Delivering what's next.™ ***

www.bostonscientific.com

www.bostonscientific.co.uk

www.bostonscientific.de

www.bostonscientific.es

www.bostonscientific.fr

www.bostonscientific.it

www.bostonscientific.nl

RCS Nanterre B420 668 420

© 2006 Boston Scientific Corporation ou ses filiales. Tous droits réservés. DINEND2133FA