

# Resolution™ Clip


Etapes de la procédure

Boston  
Scientific



## ETAPE 1 Préparation

Figure 1

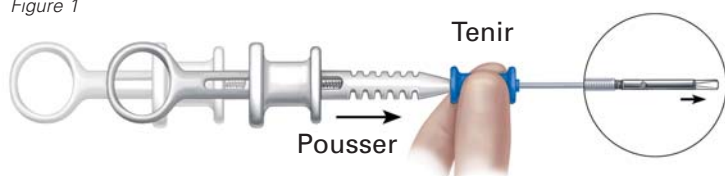

- ➔ Introduire avec précaution le **Clip Resolution** dans le canal opérateur.
- ➔ Enlever le **Bloqueur rouge** au moment où l'on peut voir le Clip sortir de l'endoscope.
- ➔ Mettre les **Mâchoires** à nu en tenant le Manche de la Gaine Externe et en poussant la Poignée distalement jusqu'à ce qu'elle se trouve appuyée contre le Manche de la Gaine Externe (Figure 1).

## ETAPE 2 Positionnement

Figure 2



Figure 3



Le Clip Resolution **s'ouvre et se ferme comme une pince à biopsie.**

- ➔ Pour ouvrir le **Clip**, pousser le Curseur en direction distale (Figure 2).
- ➔ Pour fermer le **Clip**, tirer le Curseur en direction proximale jusqu'à ce que l'on sente une résistance tactile dans la Poignée (Figure 3).
- ➔ Le Clip Resolution est conçu de manière à permettre **jusqu'à 5 ouvertures et fermetures** successives avant déploiement, ce qui aide à repositionner le Clip.\*

**Attention :** Si l'on continue à fermer le Clip au-delà de la résistance tactile, il risque d'être impossible de le rouvrir.

## ETAPE 3 Déploiement

Figure 4



Figure 5



- ➔ Déployer définitivement le **Clip** en tirant le Curseur en direction proximale au-delà du point de résistance tactile ; à ce stade, un **1<sup>er</sup> clic** se fait entendre ou sentir. Poursuivre en tirant le Curseur jusqu'à audition ou perception d'un **2<sup>ème</sup> clic** (Figure 4).
- ➔ Pousser doucement le **Curseur en direction distale** afin de séparer le Clip du dispositif de délivrance (Figure 5).
- ➔ Gainer à nouveau le cathéter en libérant le Curseur et en faisant avancer la Gaine Externe distalement. Remettre alors en place le Bloqueur rouge et retirer le cathéter de l'endoscope.

\* La capacité de réouverture et de fermeture peut être limitée, entre autres facteurs, par les circonstances cliniques et l'anatomie du patient.

Cet aperçu n'est fourni qu'aux seules fins d'illustration et vise uniquement à donner un bref résumé de la marche à suivre générale avec le Clip Resolution. Pour des instructions complètes, veuillez vous référer au Mode d'Emploi.

# Quand le repositionnement est essentiel.

## Direction Européenne – Paris

T: +33 1 57 66 80 00 F: +33 1 57 66 84 99

## Afrique du Sud

T: +27 11 840 8600 F: +27 11 463 6077

## Allemagne (Appel gratuit)

T: 0800 072 3303 F: 0800 072 3319

## Argentine

T: +5411 4896 8556 F: +5411 4896 8550

## Asie du Sud Est – Malaisie

T: +60 3 2284 1499 F: +60 3 2284 1507

## Asie du Sud Est – Philippines

T: +63 2 687 3239 F: +63 2 687 3047

## Asie du Sud Est – Singapour

T: +65 6418 8888 F: +65 6418 8899

## Asie du Sud Est – Thaïlande

T: +66 2 2654 3810 F: +66 2 2654 3818

## Australie/Nouvelle Zélande

T: +61 2 8336 5555 F: +61 2 8335 0404

## Autriche

T: +43 1 726 30 05 1022 F: +43 1 726 30 05 1030

## Balkans

T: +30 210 95 37 890 F: +30 210 95 79 836

## Belgique (Appel gratuit)

T: 080094 494 F: 080093 343

## Brésil

T: +55 11 5502 8500 F: +55 11 5103 2212

## Bulgarie

T: +359 2 986 50 48 F: +359 2 986 57 09

## Canada

T: +1 888 359 9691 F: +1 888 575 7396

## Chili

T: +562 445 4904 F: +562 445 4915

## Chine – Beijing

T: +86 10 8525 1588 F: +86 10 8525 1566

## Chine – Guangzhou

T: +86 20 8767 9791 F: +86 20 8767 9789

## Chine – Shanghai

T: +86 21 6141 5959 F: +86 21 6141 5900

## Colombie

T: +57 1 629 5045 F: +57 1 612 4761

## Corée

T: +82 2 3476 2121 F: +82 2 3476 1776

## Danemark (Appel gratuit)

T: 80 30 80 02 F: 80 30 80 05

## Espagne

T: +34 901 11 12 15 F: +34 93 405 9045

## Finlande (Appel gratuit)

T: 09 622 42 85 F: 09 622 42 86

## France

T: +33 1 39 30 49 30 F: +33 1 39 30 49 31

## Grande Bretagne & Irlande

T: +44 1727 866633 F: +44 1727 830371

## Grèce

T: +30 210 9542 300 F: +30 210 9542 310

## Hong Kong

T: +852 2960 7100 F: +852 2563 5276

## Hongrie

T: +36 1 456 30 40 F: +36 1 456 30 41

## Inde – Bangalore

T: +91 80 5112 1104/5 F: +91 80 5112 1106

## Inde – Chennai

T: +91 44 2648 0318 F: +91 44 2641 4695

## Inde – Delhi

T: +91 11 2618 0445/6 F: +91 11 2618 1024

## Inde – Mumbai

T: +91 22 5677 8844 F: +91 22 2617 2783

## Italie

T: +39 010 60 60 1 F: +39 010 60 60 200

## Les Pays-Bas

T: +31 43 356 8260 F: +31 43 356 8265

## Mexique

T: +52 55 5687 63 90 F: +52 55 5687 62 28

## Moyen-Orient/Golfe Persique/Afrique du Nord

T: +961 1 805 282 F: +961 1 805 445

## Norvège (Appel gratuit)

T: 800 104 04 F: 800 101 90

## Pologne

T: +48 22 435 1414 F: +48 22 435 1410

## Portugal

T: +351 1 381 25 40 F: +351 1 381 28 29

## République Tchèque

T: +420 2 3536 2911 F: +420 2 3536 4334

## Suède (Appel gratuit)

T: 020 65 25 30 F: 020 55 25 35

## Suisse (Appel gratuit)

T: 0800 826 786 F: 0800 826 787

## Taiwan

T: +886 2 2747 7278 F: +886 2 2747 7270

## Turquie – Istanbul

T: +90 216 464 36 66 F: +90 216 464 36 67

## Uruguay

T: +59 82 900 6212 F: +59 82 900 6212

## Venezuela

T: +58 212 959 8106 F: +58 212 959 5328

# Boston Scientific

*Delivering what's next.™\**

[www.bostonscientific.com/international](http://www.bostonscientific.com/international)

[www.bostonscientific.ca](http://www.bostonscientific.ca)

[www.bostonscientific.co.uk](http://www.bostonscientific.co.uk)

[www.bostonscientific.es](http://www.bostonscientific.es)

[www.bostonscientific.fr](http://www.bostonscientific.fr)

[www.bostonscientific.ie](http://www.bostonscientific.ie)

[www.bostonscientific.it](http://www.bostonscientific.it)

[www.bostonscientific.nl](http://www.bostonscientific.nl)

RCS Nanterre B420 668 420

© 2006 Boston Scientific Corporation  
ou ses filiales. Tous droits réservés.  
DINEND2136FB

Toutes les marques déposées mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. AVERTISSEMENT : Conformément à la législation, ce dispositif ne peut être vendu que sous prescription médicale. Les indications, contre-indications, mises en garde et mode d'emploi figurent sur la notice livrée avec chaque dispositif. Informations à n'utiliser que dans les pays avec enregistrements produits des autorités sanitaires applicables.

PSST IC 1542A Imprimé en UK par Gosling. \*L'Avenir dès maintenant.